

Nissenkamm mit Metallzähnen und Lupe



Gebrauchsanweisung:

Mit dem Läusekamm entfernen Sie schnell und gründlich Läuse und Nissen.

Nach dem Waschen mit einem geeigneten Shampoo (z. B. Anti-Laus Gel, PZN 2529383), wird das Haar gründlich ausgespült und gut durchgekämmt.

Setzen Sie die Zähne des Läusekamms so dicht wie möglich an die Kopfhaut an und kämmen Sie an ca. 3 cm breiten Haarsträhnen die Läuse und Nissen aus dem Haar.

Das Haar kann sowohl trocken als auch naß ausgekämmt werden.

Der Kamm gewährleistet ein sanftes Abschaben der Nester vom Haarschaft - ohne die Haare zu beschädigen.

Beachten Sie auch die beigegefügte ausführliche Anleitung!

Best.-Nr.: 102175



PZN 869854 3



Büttner-Frank GmbH

Am Wolfsmantel 9-11 • 91058 Erlangen • Service-Tel.: 09131/7905-38
Fax: 09131/60 27 69 • e-mail: kundenservice@buettner-frank.de
www.buettner-frank.de